

Scatir Switch Deluxe

## Infrarød 0/1 kontakt

Af Jacob Lykke Sørensen, Maj 2009

**Jeg har testet Scatir Switch fra firmaet Tash. Kontakten kan betjenes med øjnene, øjenbryn, hoved bevægelse, finger bevægelse eller en muskel bevægelse. En rigtig god løsning hvis man ikke kan bevæge sig så meget.**

Jeg er desværre nået til det punkt, hvor jeg ikke længere kan holde en almindelig 0/1 kontakt inde. Jeg har i mange år brugt en kontakt ved hovedet, som jeg kunne styre kørestolen med. Det største problem var, når jeg skulle ud af kørestolens computerstyring, så skulle kontakten holdes inde i tre sekunder, og det havde jeg ikke kræfter til. Jeg har prøvet at placere den almindelige 0/1-kontakt andre steder på kroppen uden held.



Heldigvis fik jeg fingrene i den nye Scatir Switch, som er en infrarød 0/1 kontakt. Kontakten bliver aktiveret hvis det infrarøde signal bliver brudt eller ændret, og dermed kan den bruges alle steder på kroppen, hvor der er lidt bevægelse. Der behøver ikke at være fysisk kontakt mellem sensoren og den del af kroppen der bevæges.

Kontakten kan betjenes med øjnene, øjenbryn, hoved bevægelse, finger bevægelse eller en muskel bevægelse. Man kan montere kontakten med den medfølgende svanehal, som placeres nogle centimeter fra den del af kroppen, man kan bevæge. Hvis man ønsker at aktivere kontakten med øjnene eller øjenbryn, kan man anvende de medfølgende briller, som har den lille sensor monteret.

Scatir Switch koster 3.590 kroner og der medfølger enten svanehal eller briller. ASK er forhandler af Scatir switch, som også fås i en deluxe version hvor både svanehal og briller følger med. Se på [www.ask-shop.dk](http://www.ask-shop.dk) under Nyheder 2009

Jacob Lykke Sørensen

ALS-konsulent

[Jacob@ask-ikt.dk](mailto:Jacob@ask-ikt.dk)