

Nyt hagejoystick, enkelt og funktionelt

Af Jacob Lykke Sørensen, Maj 2009


Vi har testet den nye TetraMouse, som er en enkel og funktionel håndfri mus, der kan betjenes med hagen, læberne, eller tungen.

Hvis man ikke længere kan betjene en almindelig mus, så kan TetraMouse være en rigtig god løsning. Musen består af to små mini joystick, et til at styre musen og et til klikfunktioner. Der følger forskellige kugler til joysticket med, som kan udskiftes afhængig af måden man betjener musen på. Selve boksen måler kun 10x5x3 cm.

Den medfølgende arm er nem at indstille, og kan monteres på skrivebordet, kørestolen, sengen eller direkte på væggen. Der følger ophængsskruer med.



Med det højre joystick styrer man musen rundt på og med det venstre joystick laver man de forskellige museklik. Hvis man trykker det venstre joystick op, så skifter man til programmeringstilstand, hvor man har en række indstillings muligheder herunder ændring af markør hastigheden til en af de tre forudindstillede hastigheder.

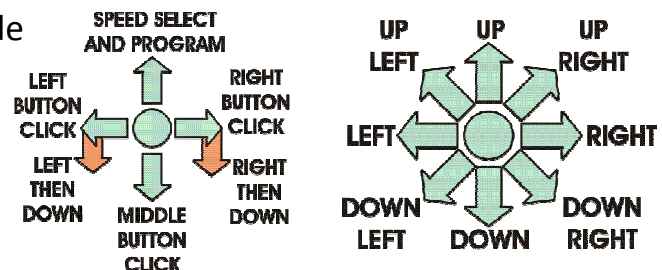

Joysticket tilsluttes via det medfølgende USB kabel og der kræves ikke noget software for at få musen til at fungere på computeren. Joysticket trækker strøm fra usb kablet, så det er ikke nødvendigt med strømledning.

Hvis man kun kan/vil betjene det højre muse- joystick, så er der på den medfølgende cd et autoklik program. Jeg selv bruger autoklik programmet MagicCursor 2000, som varmt kan anbefales.

ASK er forhandler af Tetramouse – se mere på www.ask-shop.dk under Nyheder 2009. TetraMouse koster 5.490,-

Jacob Lykke Sørensen

ALS-konsulent

Jacob@ask-ikt.dk